

GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DI MASCHERINE FAI DA TE



COME REALIZZARE UNA MASCHERINA FAI DA TE



MODELLO 1.


Materiali necessari




2 rettangoli di tessuto di cotone, 20 cm x 16,5 cm




1 rettangolo di interfodera termoadesiva di 20 cm x 16,5 cm

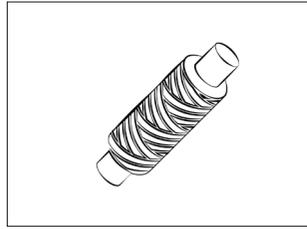


Elastico morbido

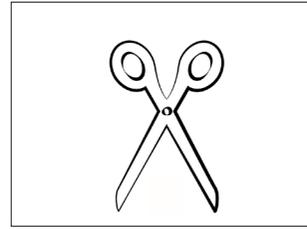

Forbici

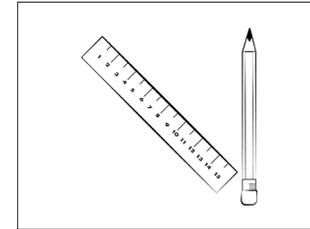


Righello e matita

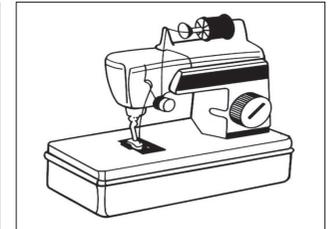


Macchina per cucire, ago e filo

1. Primo passaggio

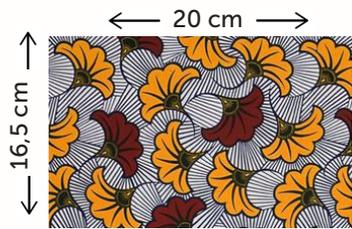

Taglia 2 rettangoli di tessuto 100% cotone, 20 cm x 16,5 cm

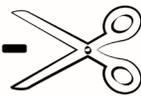

Taglia 1 rettangolo di interfodera di 20 cm x 16,5 cm

2. Secondo passaggio





Unisci i tre strati: cotone + interfodera + cotone
L'interfodera va **sempre** nel mezzo

Una volta che i tre strati sono uniti, stirarli in modo che l'interfodera aderisca ai tessuti




3. Terzo passaggio

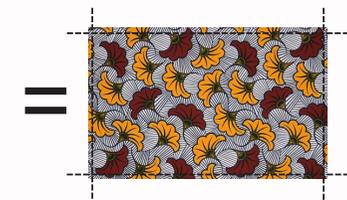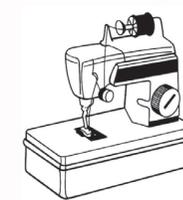

Cuci i tre strati sovrapposti


4. Quarto passaggio

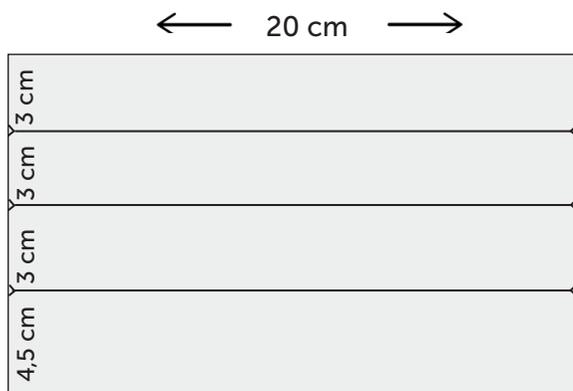

↑
16,5 cm
↓




Piega il tessuto ogni 3 cm e l'ultima piega di 4,5 cm

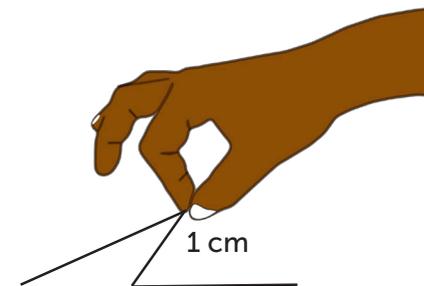

5. Quinto passaggio



+

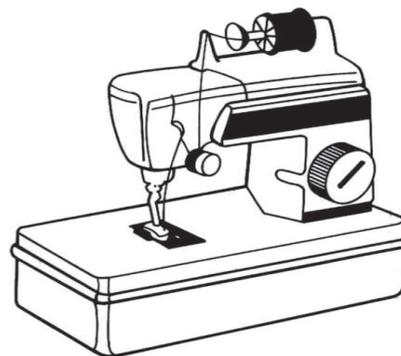

=



Cuci di lato con le pieghe realizzate sul tessuto

6. Sesto passaggio




Cuci il nastro diagonale versare l'intero contorno

7. Settimo passaggio



Cucire una fascia elastica di 10 cm su ciascun lato

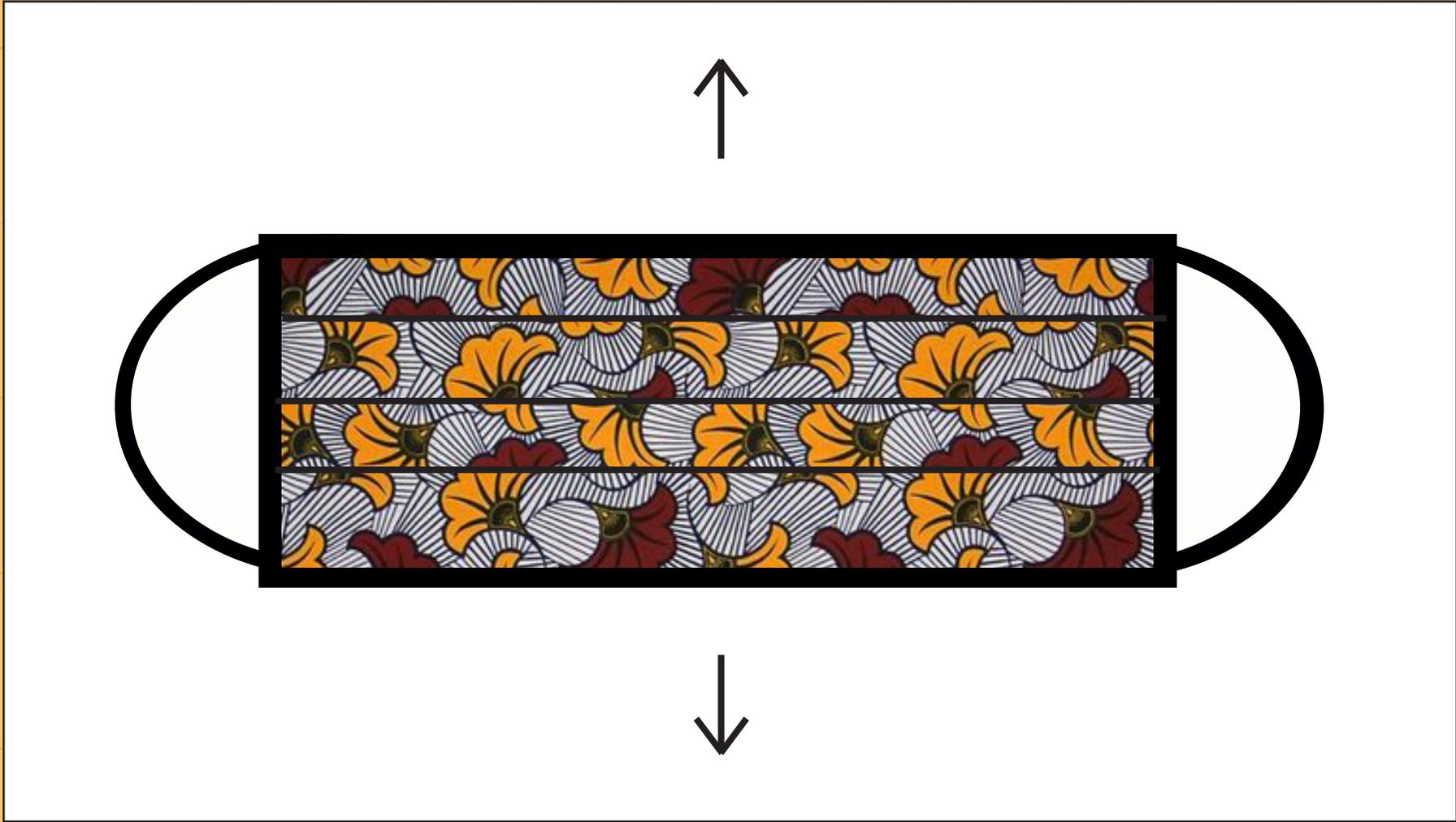



MODELLO 2.

Materiali necessari




2 rettangoli di tessuto di cotone, 20 cm x 16,5 cm




1 rettangolo di interfodera termoadesiva di 20 cm x 16,5 cm




Ferro da stiro

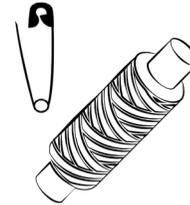


Elastico morbido e una spilla di sicurezza

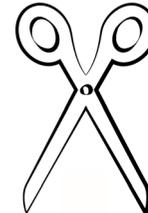

Forbici



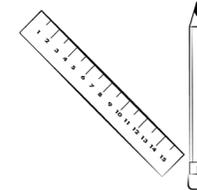


Righello e matita

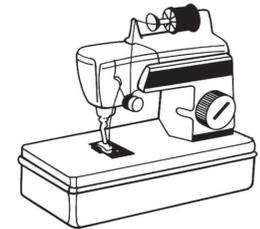


Macchina per cucire, ago e filo

1. Primo passaggio

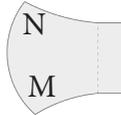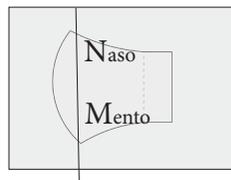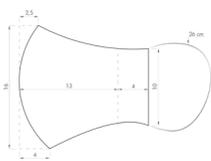

Disegna con una matita la forma sull'interfodera e taglia
Oppure disegna tante forme per il numero di maschere da creare e taglia alla fine

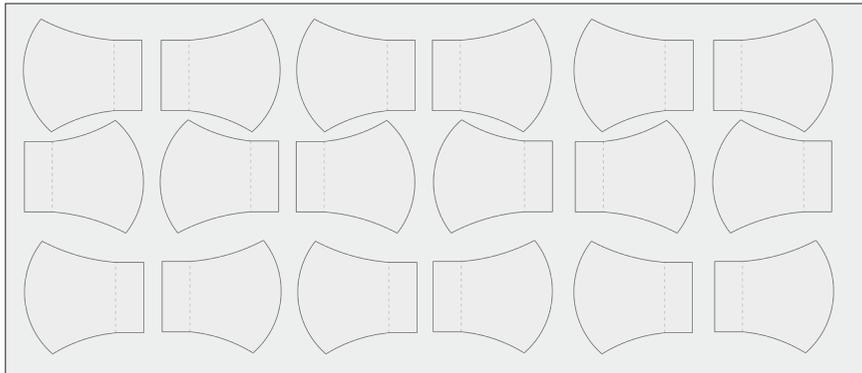


2. Secondo passaggio




Posiziona l'interfodera sul tessuto in cotone 100% e stira con il ferro

Taglia la forma sul tessuto

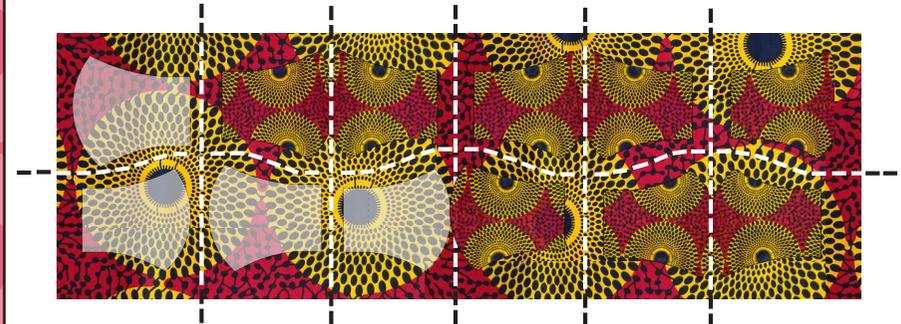


. Terzo passaggio

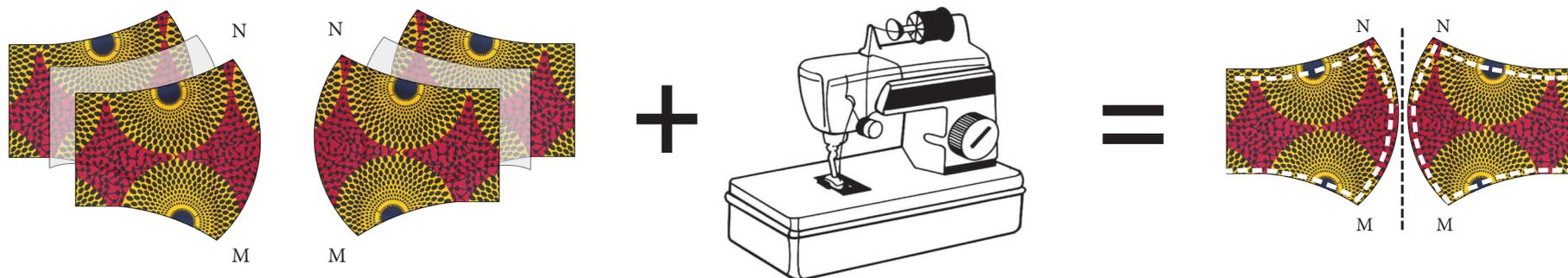

Metti i tre strati insieme lato destro e lato sinistro: cotone + interfodera + cotone
L'interfodera va **sempre** nel mezzo
Cuci i 3 strati e le 2 parti (sinistra e destra) della maschera

ATTENZIONE: le forme non sono simmetriche, l'angolo per coprire il naso è più piccolo rispetto al mento, tuttavia prima di cucire, è necessario assicurarsi che gli angoli si adattino perfettamente

4. Quarto passaggio

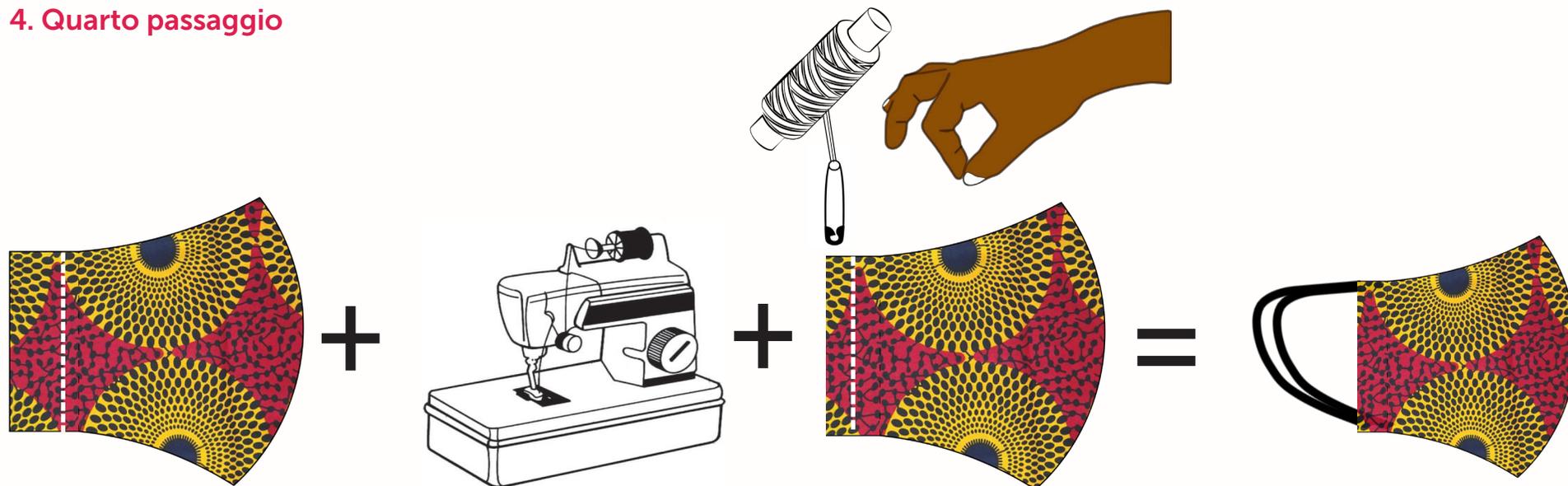

Fai un orlo di 2 cm con spazio all'interno per mettere l'elastico

Cuci una fascia elastica di 25 cm su ciascun lato





Si consiglia di stampare il modello così da assicurarsi che le misure siano corrette durante la creazione

